

すいすいケア ver1.2.5 リリースノート

- ・リリース日 2022年9月20日
- ・リリースバージョン ver1.2.5

1.概要

ver1.2.5では以下の機能を追加しております。

① スマートフォンのカメラ映像の拡大表示を追加

ご要望が多かったスマートフォンのカメラ映像を拡大表示する機能を追加しました。

② スマートフォンの居室情報画面のカメラ映像表示手順を変更

スマートフォンの居室情報画面の初期表示でカメラウインドウを表示するようになりました。従来はカメラボタンを押下後にカメラウインドウを開いていました。

③ スマートフォンに対応内容と対応者の入力を追加

アラーム発生時に、居室情報画面にて発生したアラームに対する対応記録を入力できる機能を追加しました。入力した内容はサーバーへ保存され、アラーム履歴画面で確認することが出来ます。

④ アラーム履歴画面に対応内容と対応者の表示、編集機能を追加

アラーム履歴画面にアラームごとに対応内容と対応者を入力できるようになりました。スマートフォンで入力した内容はここに表示されます。

⑤ アラームの自動解除機能を追加

アラーム発生後、設定した一定時間後にアラームを自動解除する機能を追加しました。アラーム解除忘れによる次アラームの見落としを防止します。

⑥ スマートフォンへのナースコール通知の停止機能を追加

ナースコール連携をされているお客様向けの機能です。ナースコールが鳴った際に、スマートフォンへの通知をしないように設定が可能です。ナカヨ通話アプリへの通知とすいすいケアの通知が重複し煩雑な場合を想定しています。設定の際は弊社スタッフまでご連絡ください。

追加機能使用方法

① スマートフォンのカメラ映像の拡大表示

- ・スマートフォンで居室情報画面を表示します。(カメラボタンを押さなくても、初期表示でカメラが表示されます。)
- ・カメラ映像ウィンドウをクリックしてください (赤枠部)



- ・拡大映像が表示されます。元の画面に戻る際は、画面上のどこかをクリックして下さい。



追加機能使用方法

③ スマートフォンに対応内容と対応者の入力を追加

- ・居室表示画面で、対応入力ボタンをクリックします。(赤枠部)



- ・「対応内容」と「対応者」を入力し、保存ボタンを押すと登録されます。
各入力フィールドをクリックするとスマートフォンの入力ツールが表示されます。
機種によっては音声入力も可能ですのでご活用ください。



追加機能使用方法

④ アラーム履歴画面に対応内容と対応者の表示、編集機能を追加

- ・パソコンのアラーム履歴メニューをクリックします（赤枠部）

すいすいケア

施設名 テスト施設

見守り画面 見守り機器設定 **アラーム履歴** マスタ設定

終了

南廊下	401 デモ居室	402 レンジャ人感	403 ペンダントC	404 固定型C
カメラ	人感 開閉	人感 コール	人感 コール	人感
カメラ	カメラ	カメラ	カメラ	カメラ
非常口	301 宮下 郁美	302 松本 初	303 小柳 真里	304 大森 菊江
カメラ	人感	人感	人感	人感
カメラ	カメラ	カメラ	カメラ	カメラ
食堂	201 谷本 虎之助	202 平井 利次	203 中谷 愛作	204 岡村 昭二
カメラ	開閉	開閉		
カメラ	カメラ	カメラ	カメラ	カメラ
玄関	101 古川 和広	102 藤原 督彦	103 横山 理絵	104 内山 松代
カメラ				
カメラ	カメラ	カメラ	カメラ	カメラ

- ・アラーム履歴画面で確認したい対象期間を設定し、検索するボタンをクリックします。

すいすいケア

施設名 テスト施設

見守り画面 見守り機器設定 **アラーム履歴** マスタ設定

終了

アラーム履歴

アラーム履歴検索対象時間 2022年 9月22日 ~ 2022年 9月22日

検索する CSV出力 キャンセル 保存

No.	日時	所属	居室名/略称	利用者名	アラーム内容	対応内容	対応者
-----	----	----	--------	------	--------	------	-----

・表右部に対応内容と対応者が表示されます。スマートフォンで入力した場合、その内容が表示されます。当画面での編集保存も可能です。

すいすいケア 施設名 テスト施設

見守り画面 見守り機器設定 アラーム履歴 マスタ設定 終了

14時58分 201 谷本 虎之助 開閉

アラーム履歴

アラーム履歴検索対象時間 2022年 9月22日 ~ 2022年 9月22日

No.	日時	所属	居室名/略称	利用者名	アラーム内容	対応内容	対応者
1	2022/09/22 14:58	2階層	201/201	谷本 虎之助	開閉	テスト入力	佐藤

追加機能使用方法

⑤ アラームの自動解除機能を追加

- ・パソコンのアラーム履歴メニューをクリックします（赤枠部）



- ・アラーム解除メニューをクリックします（赤枠部）



- ・アラーム解除設定画面で、自動解除させたい時間を設定し、保存ボタンをおしてください。なお、0時間0分で保存した場合、自動解除されません（従来通り、手動でアラーム解除をお願いします。）

The screenshot shows a web-based interface for alarm management. At the top, there is a navigation bar with icons for '見守り画面' (Monitoring Screen), '見守り機器設定' (Monitoring Device Settings), 'アラーム履歴' (Alarm History), and 'マスタ設定' (Master Settings). A red '終了' (End) button is visible. The main content area has a breadcrumb trail: '施設' (Facility) > '所属' (Affiliation) > '居室' (Room) > 'レイアウト' (Layout) > 'ユーザ管理' (User Management) > 'アラーム時刻' (Alarm Time) > 'アラーム解除' (Alarm Release). The 'アラーム解除' page is active. It features a 'キャンセル' (Cancel) button and a '保存' (Save) button. The main text reads: 'アラーム自動解除時間設定' (Alarm Auto Release Time Setting) with input fields for '0' hours and '10' minutes. Below this, a note states: 'アラーム発生後、手動でアラーム解除しない状態のまま設定された時間になるとアラームを自動解除します。設定値が「0」の場合は、自動解除されません。' (After alarm occurrence, if the alarm is not manually released, it will be automatically released when the set time is reached. If the set value is '0', it will not be automatically released.)